

ACTIMOVE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Actimove® GAUNTLET csuklórögzítő

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Rendeltetés: Csukló sérülések esetén vagy rándulások, zúzódások megelőzésére.

Lejárati időt és méretet: lásd a csomagoláson.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Bevezető: Köszönjük, hogy a levehető fém támasszal ellátott, bal és jobb kézen egyaránt használható Actimove® csuklórögzítőt választotta.

A termék leírása: Az Actimove® csuklórögzítő az anatómiai kialakítású támaszaival csukló- és hüvelykujjfájdalom enyhítésére, illetve a gyógyulás elősegítésére alkalmazható. Puha, latexmentes anyagának köszönhetően rendkívül kényelmes, emellett könnyen felhúzható kialakítású és egyénileg állítható pántokkal rögzíthető.

Rendeltetés:

A termék rendeltetése a csukló és a hüvelykujj megfelelő helyzetben tartása.

Alkalmazási területei többek között:

- a hüvelykujj idült csont- és ízületi gyulladása
- hüvelykujj-irritáció
- hüvelykujjrándulás
- ficam és húzódás
- reumás ízületi gyulladás
- műtét utáni ellátás
- baleset utáni ellátás
- de Quervain-szindróma

Kérjük, forduljon orvosához, ha bizonytalan abban, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára.

Ellenjavallatok:

- Perifériás vénás ér-elzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)
- Perifériás artériás keringési zavarok
- Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (széptikus phlebitis)
- Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
- Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
- A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
- A termék anyagával szembeni intolerancia.

Használati útmutató: Megelőzés fizikai aktivitás (pl. sport) során. A használat ideje lehet egy óra (például sporttevékenység közben), de akár hosszú távú is, ha krónikus betegség miatt mindennapi használat javasolt. Az Actimove® csuklórögzítő kesztyű egyaránt használható a bal és a jobb kézen.

Alkalmazás

Ha a bal csuklóhoz használja, a támaszt helyezze az alsó zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét stabilizálja. (1. ábra)

Ha a jobb csuklóhoz használja, a támaszt helyezze a felső zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét stabilizálja. (2. ábra)

A hosszabb pántot (1. pánt) rögzítse a kézfején. (5. ábra)

A rövidebb pántot (2. pánt) csavarja a hüvelykujja köré. (6. ábra)

Figyelmeztetés:

- Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók mellékhatások.
- Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási helyeken vérellátási zavar alakult ki.
- Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
- Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás romlását okozhatja.
- A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Megjegyzés

Az Actimove termékek CE minősítéssel rendelkeznek, az európai szabványnak megfelelnek.

A lejáratí idít lásd a csomagoláson.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg) **vagy az Essity Hungary Kft.-nek** (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) **vagy az illetékes helyi hatóságnak** (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).



Lezárás dátuma: 2022. július 22.

