

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Actimove® deréktámasz

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Rendeltetés: Akut és krónikus derékfájdalomra, degeneratív problémákra, ágyéki instabilitás és műtét utáni rehabilitáció esetére.

Lejáratú időt és méretet: lásd a csomagoláson.

Gyártó: BSN Medical, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

**Bevezető:** Köszönjük, hogy az Actimove® deréktámaszt választotta.

**A termék leírása:** Kiváló neoprénmentes anyagból készült deréktámasz, mely csökkenti az ágyéktájon kialakult fájdalmat. A kúpos kialakítású, nagy sűrűségű habpanel megerősíti és stabilizálja az ágyéktájat. A kidomborodó nyomópárnák fájdalomcsökkentő hatású masszázst biztosítanak. A megfogó nyílásoknak és a hurkoknak köszönhetően könnyen felhelyezhető és beállítható a szükséges nyomás.

### Rendeltetés:

A termék rendeltetése enyhítő masszázshatás és stabilitás az ágyéki régióban.

Alkalmazását többek között az alábbi esetekben ajánljuk:

- Akut és krónikus derékfájdalomra
- Degeneratív hát problémákra (pl.: csigolyameszesedés)
- Ágyéki instabilitás (pl.: izomeléggtelenségek)
- Műtét utáni rehabilitáció esetére

Kérjük, forduljon orvosához, ha bizonytalan abban, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára.

### Ellenjavallatok:

- Perifériás vénás ér-elzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)
- Perifériás artériás keringési zavarok
- Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (széptikus phlebitis)
- Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
- Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
- A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
- A termék anyagával szembeni intolerancia.

**Használati útmutató:** Mindennapi használatra degeneratív, vagy akut probléma esetén. A használat ideje lehet egy óra, de akár hosszú távú is, ha krónikus betegség miatt mindennapi használat javasolt. A terméket javasoljuk, hogy ruhára vegye fel. Az Actimove® deréktámasz 40°-on mosható.

### Felhelyezés:

1. Nyissa szét a deréktámaszt (a belső címke felül kell elhelyezkedjen).

2. Dugja be jobb kezét a jobb oldali, bal kezét pedig a bal oldali, az öv két végén található behúzó fülbe.
3. Helyezze az övet a dereka köré, és bal kezével állítsa be a megfelelő szorosságot, majd jobb kezével rögzítse az övet.
4. Ellenőrizze, hogy az öv hátsó részén található kidomboródó nyomópárnák a megfelelő helyre esnek-e.

#### **Figyelmeztetés:**

- Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók mellékhatások.
- Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási helyeken vérellátási zavar alakult ki.
- Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
- Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás romlását okozhatja.
- A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

#### **Megjegyzés**

A lejáratí idót lásd a csomagoláson.

**Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).**



Lezárás dátuma: 2022. július 22.

