

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Actimove Knee Brace Wrap Around Simple Hinges Condyle Pads Actimove® körbetekerhető, csuklós, párnázott tédrögztítő

A termék célja a térd stabilizálása.

Alkalmazási területek:

- ACL, LCL, MCL, PCL rándulások és szakadások
- Középső/oldalsó porcgyűrű szakadások
- Térdkalács instabilitás
- Térdkalács íngyulladás
- Térdkalács porcdaganat
- Osgood-Schlatter betegség

Ellenjavallatok:


- Perifériás vénás ér-elzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)
- Perifériás artériás keringési zavarok
- Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (széptikus phlebitis)
- Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
- Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
- A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
- A termék anyagával szembeni intolerancia

Jellemzők:

- Megfelelő orvosi kompressziót és egyenes terápiai hőhatást nyújtó eszköz, segítve ezzel a fájdalom csillapítást és a gyógyulást.
- COOLMAX® AIR TECHNOLOGY alkalmazásával készült (Neoprénmentes), gyorsan száradó perforált anyagának köszönhetően jól szellőzik, biztosítva ezzel a bőr lélegző képességének megtartását és ezáltal az átlagon felüli kényelmet.
- A lágy szövetek és ínszalag sérülésekből, illetve csont-ízületi gyulladásokból eredő térdfájdalmakat a mediális és laterális oldalt elhelyezkedő (belső-külső oldali) csuklók által biztosított erős stabilizáló hatása révén kezeli.
- Elülső részén található zárórendszere miatt az eszköz fel- és levétele fájdalommentes, kényelmes, irritációmentes használatot biztosít.
- Az elasztikus kapocs és huroktartó jobb illeszkedést, tépőzáras zárórendszere biztonságos rögzítést tesz lehetővé.
- Az Actimove® tédrögztítő bal vagy jobb térdre is használható.


Actimove tédrögztítő S, M, L, XL, XXL, XXXL

Alkalmazás:

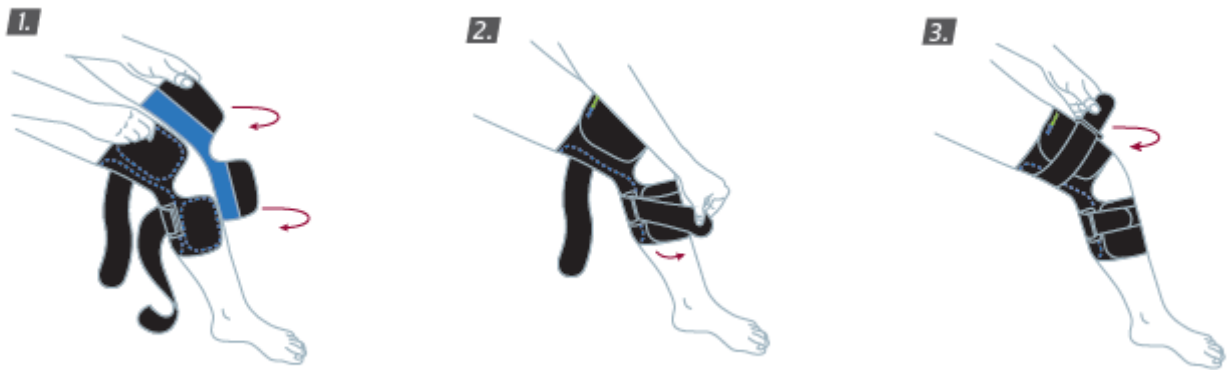

A viselési idő változó, de általában a testmozgás vagy a fizikai tevékenység időtartamára, azaz 30-180 percre korlátozódik. Akut állapotban a térdrögzítő egész nap viselhető.

Méretezés:

	SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
		30.5 - 35.5 cm 12" - 14"	35.5 - 40.5 cm 14" - 16"	40.5 - 46 cm 16" - 18"	46 - 51 cm 18" - 20"	51 - 56 cm 20" - 22"	56 - 61 cm 22" - 24"	61 - 66 cm 24" - 26"

Összetétel:

Elasztán, poliamid, poliészter, polioximetilén, PVC, SBR, rozsdamentes acél

Sem a termék sem a csomagolás nem tartalmaz természetes gumi latexet, illetve ftalátot.

Tárolás:

Száraz, tiszta, közvetlen napsugárzástól védett helyen.

Tisztítás:

Maximális mosási hőmérséklet: 40°C. Fehéritő használata tilos. Fektetve szárítandó. Nem vasalható. Vegytisztítása tilos.



Maximum
washing
temperature



Do not
bleach



Flat
drying



Do not
iron



Do not
dry clean

Actimove térdrögzítő S, M, L, XL, XXL, XXXL

Felhasználhatósági idő:
A termékek eltarthatósági ideje 5 év.

A lejáratú időt lásd a csomagoláson.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg,
Németország

Forgalmazza: Essity Hungary Kft., 1021 Budapest Budakeszi út 51.

Megjegyzés

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg) **vagy az Essity Hungary Kft.-nek** (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) **vagy az illetékes helyi hatóságnak** (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).



Lezárás dátuma: 2022. július 22.