

# ACTIMOVE® ÁLLÍTHATÓ KÖNYÖKTÁMASZ GYEREKEKNEK – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Állítható könyöktámasz gyerekeknek könyöksérülésekre és azok megelőzésére, illetve rándulások és húzódások esetére.

**Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

Az Actimove® termékek elérhetők a patikákban vagy a gyógyászati segédeszközboltokban. A termék megvásárlásához orvosi rendelvény nem szükséges.

## Használati útmutató:

Nyissa ki a dobozt és vegye ki belőle a terméket.

Nyissa ki a tépőzárát, majd dugja bele a gyermek karját úgy, hogy a fekete szövetanyag a könykhajlatba essen, és húzza fel a gyermek könyökére oly módon, hogy az Actimove® logó az eszköz felső, felkar felőli részén legyen.

Ezt követően rögzítse a terméket: előbb az alkari, majd a felkari tépőzár segítségével. A kellő stabilitást a tépőzárakkal, a gyermek karjának legmegfelelőbb méretre történő beállításával érheti el.

A javasolt viselési idő változó, de általában a testmozgás vagy a fizikai tevékenység időtartamára, azaz 30–180 percre korlátozódik. Akut állapotban a könyöktámasz egész nap viselhető.

A termék viselése nem javasolt éjszaka és pihenőidőben, mert a túlzott használat miatt az izomzat legyengülhet, az izom stabilizáló, megtartó funkciója sérülhet.

Terápiás indokkal történő viselése esetén, az eszközhasználat szükségének teljes időtartamát beszélje meg szakemberrel.

A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!



Kézzel mosható

## Ellenjavallatok:

- Perifériás vénás érelzáródással járó betegségek (Phlebo–thrombosis, Thrombo–phlebitis)
- Perifériás artériás keringési zavarok
- Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (széptikus phlebitis)
- Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
- Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
- A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
- A termék anyagával szembeni intolerancia

Az Actimove® termékek **CE** minősítéssel rendelkeznek, az európai szabványnak megfelelnek.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg

Forgalmazó: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményt, kérjük, jelentsen a BSN Medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24., 20253 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869–300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).