

ACTIMOVE® CARPALIS CSUKLÓSTABILIZÁLÓ – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Csuklóstabilizáló carpal tunnel szindróma tüneteinek enyhítésére (pl. rendszeres számítógéphasználat esetén).

Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Az Actimove® termékek elérhetők a patikákban vagy a gyógyászati segédeszközboltokban. A termék megvásárlásához orvosi rendelvény nem szükséges.

Használati útmutató:

Nyissa ki a dobozt és vegye ki belőle a terméket.

Nyissa szét a tépőzáras hevederpántot, és húzza fel a terméket a kezére oly módon, hogy a tenyérpárna a fémsín hajlított részén nyugodjon.

A megfelelő stabilitás érdekében az eszközt rögzítő csuklópántot a tépőzárral rögzítse a kívánt szorosságúra.

A javasolt viselési idő változó, de általában a testmozgás vagy a fizikai tevékenység időtartamára, azaz 30-180 percre korlátozódik. Akut állapotban a csuklóstabilizáló egész nap viselhető.

A termék viselése nem javasolt pihenőidőben, mert a túlzott használat miatt az izomzat legyengülhet, az izom stabilizáló, megtartó funkciója sérülhet.

Terápiás indokkal történő viselése esetén, az eszközhasználat szükségének teljes időtartamát beszélje meg szakemberrel.

A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!



Kézvel mosható

Ellenjavallatok:

- Perifériás vénás érelzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)
- Perifériás artériás keringési zavarok
- Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (széptikus phlebitis)
- Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
- Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
- A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
- A termék anyagával szembeni intolerancia

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg

Forgalmazó: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN Medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).