

ACTIMOVE® TÉRDKALÁCSOT SZABADON HAGYÓ TÉRDTÁMASZ – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termékek:

- Actimove® térdkalácsot szabadon hagyó térdtámasz S
- Actimove® térdkalácsot szabadon hagyó térdtámasz M
- Actimove® térdkalácsot szabadon hagyó térdtámasz L
- Actimove® térdkalácsot szabadon hagyó térdtámasz XL

Térdkalácsot szabadon hagyó térdtámasz krónikus, degeneratív eredetű térd fájdalom enyhítésére. Használja túlerőtetésből fakadó, vagy ismétlődő fájdalom szindrómák esetén, illetve krónikus degeneratív térd problémák esetén.

Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Az Actimove® termékek elérhetők a patikákban vagy a gyógyászati segédeszközboltokban. A termék megvásárlásához orvosi rendelvény nem szükséges.

Használati útmutató:

Nyissa ki a dobozt és vegye ki belőle a terméket.

Húzza fel a térdére oly módon, hogy az Actimove® logó az eszköz felső, comb felőli részén legyen, a térdkalács pedig a nyitott részhez essen.

A javasolt viselési idő változó, de általában a testmozgás vagy a fizikai tevékenység időtartamára, azaz 30–180 percre korlátozódik. Akut állapotban a térdtámasz egész nap viselhető.

A termék viselése nem javasolt éjszaka és pihenőidőben, mert a túlzott használat miatt az izomzat legyengülhet, az izom stabilizáló, megtartó funkciója sérülhet. A gyógytorna idejére levehető orvosi indikáció alapján.

Terápiás indokkal történő viselése esetén, az eszközhasználat szükségének teljes időtartamát beszélje meg szakemberrel.

A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!



40° C-on mosható

Ellenjavallatok:

- Perifériás vénás érelzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)
- Perifériás artériás keringési zavarok
- Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (széptikus phlebitis)
- Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
- Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
- A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
- A termék anyagával szembeni intolerancia

Az Actimove® termékek **CE** minősítéssel rendelkeznek, az európai szabványnak megfelelnek.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg

Forgalmazó: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményt, kérjük, jelentsen a BSN Medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24., 20253 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).