

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ACTIMOVE® LUMBAR SACRAL DERÉKTÁMASZTÓ ÖV, NYOMÓPÁRNÁVAL

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Lejáratidőt és méretet: lásd a csomagoláson.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg, Németország

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft . 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Bevezető: Köszönjük, hogy a nyomópárnával ellátott Actimove® Lumbar Sacral deréktámasztó övet választotta.

A termék leírása: Az Actimove® Lumbar Sacral deréktámasztó öv nyomópárnával egy orvostechnikai eszköz, amely célzott stabilitást biztosít az ágyéki régióban, csökkentve ezáltal a hátfájdalmat a gerinc alsó szakaszán. Az áthelyezhető párna masszírozó hatást fejt ki az ágyéki területre a jobb vérkeringés és az izomfeszülés enyhítése érdekében. A réteges kialakítás fokozza a támaszhatást, továbbá megfelelően pozicionálja az alsó háti gerincszakaszt. A zsebes kialakításnak köszönhetően könnyen felhelyezhető és levehető. Légáteresztő hátlap kialakítása szellőzést tesz lehetővé a maximális kényelem érdekében.

Rendeltetés:

A termék rendeltetése az ágyéki gerincszakasz stabilizálása.

Alkalmazását többek között az alábbi esetekben ajánljuk:

- Akut és krónikus derékfájdalomra
- Ágyéki terület degeneratív elváltozásai esetén (pl.:osteoporosis/csontritkulás, osteochondrosis/ízületi csont-és porc degeneratív elváltozása , spondylosis/gerinc kopásos megbetegedése, spondylarthrosis/gerinc porckopása)
- Ágyéki instabilitás
- Műtét utáni rehabilitáció esetére
- Ágyéki porckorong előemelkedése, kitüremkedése
- Visszatérő deréktáji bántalmak, sérülések megelőzése

Kérjük, forduljon orvosához, ha bizonytalan abban, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára.

Ellenjavallatok:

- Perifériás vénás ér-elzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)
- Perifériás artériás keringési zavarok
- Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (széptikus phlebitis)
- Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
- Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély

- A végtagok idegkárosodása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
- A termék anyagával szembeni intolerancia.

Használat: A terméket javasoljuk, hogy vékony ruhára vegye fel. Az Actimove® Lumbar Sacral deréktámasztó öv nyomópárnával egyszemélyes használatra szolgál.

Mindennapi használatra krónikus degeneratív, vagy akut probléma esetén. A használat ideje lehet akár egy óra, de akár hosszú távú/folyamatos is, ha krónikus betegség miatt mindennapi használat javasolt.

Felhelyezés:

A termék felvétele álló helyzetben javasolt.

1. Nyissa szét a derékámasztó övet, és győződjön meg arról, hogy a rugalmas nyomópárna, a hátsó panel, horog- és hurokrögzítő ott található, ahol a fájdalom jelentkezik.
2. Helyezze középre az övet a dereka körül a fenék feletti részen. Tartsa úgy az övet a derék körül, hogy az ujjhurok a jobb oldalon legyen (a test felé nézzen).
3. A jobb kezét csúsztassa az ujjhurokba, bal kezével fogja meg az öv bal oldali részét és húzza a főv mindkét oldalát előre felé, és először tekerje a bal oldalt (ujjhorog nélkül) a teste köré megfelelő szorossággal.
4. Tekerje a jobb oldalt a teste köré, és rögzítse a támasztékra, amíg szorosan meg nem tartja a fenék felső részét.
5. Húzza előre felé az átfedő övet majd megfelelő szorossággal rögzítse a tépőzárak segítségével a főv felett.
6. Ezután zárja rá a másik oldalt, és győződjön meg róla, hogy kényelmes-e, és a megfelelő kompresszió biztosított-e.

Kezelési útmutató:

Géppel mosható (legfeljebb 40°C/105°F finom mosási ciklus és enyhe mosószer használatával). Szárítsa meg szobahőmérsékleten, és győződjön meg róla, hogy a deréktámasztó öv teljesen száraz, mielőtt újra felvenné. A termék alakjának és funkciójának megőrzése érdekében kérjük, ne használjon a mosáshoz olyan adalékanyagokat, mint a szövetlágyító, az optikai fényesítő vagy a folteltávolító. Ne fehérítse, tisztítsa (száraz tisztítás), ne szárítsa szárítógépben és ne vasalja.

Kérjük, mosás előtt rögzítse az összes zárat! Kérjük, mosás előtt feltétlenül távolítsa el a nyomópárnat! A tépőzárakat a mosáshoz le kell zárni.

Figyelmeztetés:

- Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók mellékhatások.
- Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási helyeken vérellátási zavar alakult ki.
- Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
- Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás romlását okozhatja.

- A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Megjegyzés

Az Actimove® termékek CE minősítéssel rendelkeznek, az európai szabványnak megfelelnek.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ; (NNGYK), 1135 Budapest, Szabolcs utca 33., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafi ók 450).



Lezárás dátuma: 2024. március 7.