

## Címke

### **ACTIMOVE® MANUS FORTE CSUKLÓRÖGZÍTŐ (jobb kézre)**

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Rendeltetés Csukló sérülések esetén vagy rándulások, zúzódások megelőzésére. Beépített alumínium sínnel a csuklóízület alátámasztására.

Lejáratási időt, méretet és méretábrázolást: lásd a csomagoláson.

Gyártó: BSN Medical, Schützenstrasse 1-3, 22761 Hamburg, Németország

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51

## Használati útmutató

### **Actimove Manus Forte csuklórögztő**

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Rendeltetés: Csukló sérülések esetén vagy rándulások, zúzódások megelőzésére.

Lejáratási időt, méretet és méretábrázolást: lásd a csomagoláson.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Kedves Vásárló,

Köszönjük, hogy az Actimove Manus Forte csuklórögztőt választotta!

### **A termék leírása**

Az Actimove Manus Forte csuklórögztő egy textil anyagú csuklóstabilizáló, amely egy alumínium sín közreműködésével immobilizálja a csukló ízületeit. Fájdalmas állapotok, csukló irritáció és a csukló környezetének krónikus vagy akut rendellenességeinek kezelésére szolgál. A kiváló minőségű, latexmentes anyagból készült termék légáteresztő és kényelmes viseletet biztosít. Az anatómiai kialakítású ortopédiai sín és a két extra széles pánt erős stabilizációt és támaszt nyújt.

A cső alakú konstrukciónak köszönhetően, a rögzítő könnyen felhelyezhető egy kézzel is. Az Actimove Manus Forte rögzíti a csuklót, amíg az ujjakat szabadon hagyja.

Kérjük, kövesse az alábbi instrukciókat és gyógyuljon meg gyorsan!

### **Javallat**

A termék rendeltetése a csukló megfelelő helyzetben tartása.

Alkalmazási területek:

- Gyulladásokra (pl.: De Quervain szindróma, inyhüvely gyulladás)
- Rándulásokra és zúzódásokra
- Lágyszövet sérülésekre
- Csont- és ízületgyulladásra
- Reumás ízületi gyulladásokra

- Műtét utáni kezelésekre
- Poszttraumás kezelések
- Gipszeltávolítás utáni sebekre

Kérjük, forduljon orvosához, ha bizonytalan abban, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára.

#### **Ellenjavallatok:**

- Perifériás vénás ér-elzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)
- Perifériás artériás keringési zavarok
- Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (széptikus phlebitis)
- Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
- Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
- A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
- A termék anyagával szembeni intolerancia

#### **Használati útmutató**

A termék otthoni használatra van kifejlesztve, vagy bizonyos esetekben sérülés megelőzés céljából, bizonyos tevékenységek közben (pl.: sporttevékenység). A használat ideje lehet egy óra (például sporttevékenység közben), de akár hosszú távú is, ha krónikus betegség miatt mindennapi használat javasolt.

#### **Felhelyezés:**

Húzza fel az Actimove Manus Forte eszközt a csuklójára, mint egy kesztyűt, miközben a hüvelykujját a nyílásba helyezi (1. ábra).

Először zárja le az alsó pántot (2. ábra), majd a felsőt (3. ábra) és végül a középső pántot (4. ábra).

Kérjük, mérsékelt erőfeszítéssel helyezze fel a rögzítőt, biztosítva, hogy szorosan illeszkedik anélkül, hogy befolyásolná az ujjai mobilitását.

#### **Tisztítás és gondozás:**

Az Actimove Manus Forte kézzel és géppel is mosható (kíméletes mosási cikluson 30 °C-on). Kérjük, ne használjon fehérítőt, vegytisztítást, szárítást vagy vasalót a csuklórögzítőn, fekve szárítsa és hagyja megszáradni teljesen mielőtt újra viselné.

Mosás előtt kérjük, távolítsa el a sánt a zsebből és rögzítse a pántokat!

#### **Figyelmeztetés:**

- Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók mellékhatások.
- Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási helyeken vérellátási zavar alakult ki.
- Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
- Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás romlását okozhatja.

A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

## Megjegyzés

**Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN medical GmbH vállalatnak** (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg) **vagy az Essity Hungary Kft.-nek** (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) **vagy az illetékes helyi hatóságnak Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ; (NNGYK), 1135 Budapest, Szabolcs utca 33., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).**



Lezárás dátuma: 2024. március 7.